

ALIVE® PPE

PROTECTIVE DISPOSABLE RESPIRATOR WITH VALVE



Ellerinizi
yıkayınız




Maskenizi doğru
yöne çevirin (sert
kenar yukarı)



Lastik bantları kulakların her iki
yanında başın arkasından geçirin,
maskenin genenizi iyi kapattığını
kontrol edin



Buruna uyması
için sert kenarı
sıkıştırın

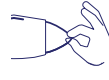

Çıkmak için
sadece lastiklere
dokunun



Maskeyi
çıkardıktan
sonra ellerinizi
yıkayın

CE 2163

EN149:2001+A1:2009
Model Kodu: ALIVE PPE 9020



SKT: 2022/08

NARKONTEKS

TEKSTİL İHR.İTH.SAN. VE TİC.A.Ş.



Web: www.narkonteks.com
E-mail: info@narkonteks.com

Buca Org. San. Bölgesi (BEGOS) Doğuş Cad.3/19 Sokak No:12
35160 Buca- İzmir / TÜRKİYE
Telefon (PBX) +90.232.4408686 Fax +90.232.4404151
GSM +90.532.7554030 Destek 0800 4156406

ALIVE PPE 9020 KULLANIM TAL MATLARI

1. Maskeyi elinizde lastikleri aŖađıya ve burun demiri olan kısım parmaklarınızın ucuna gelecek Ŗekilde tutunuz.
2. Maskeyi ađzınızı ve burnunuzu kapatacak Ŗekilde yzünüzze yerleŖtiriniz. Lastikleri kulađınıza takınız.
3. Dikkatlice burun demirini burnunuzun Ŗekline gbre sıkınız. Maskenin yzünüzze tam olarak oturduđunu kontrol ediniz.
4. Kontrol etmek iin nefes alınız ve herhangi bir hava kaađı varsa maske kullanacađınız alana girmeyiniz, maskeleri deđiŖtiriniz.

Önemli Not: Son kullanma tarihine (SKT) dikkat ediniz. Sakallı olarak maskeyi kullanmayınız.

INSTRUCTION FOR USE OF ALIVE PPE 9020

1. Hold the mask in your hand with the rubber straps hanging forwards the front over the nose clip.
2. Place the mask over your nose and mouth. Place the rubbers on your ears.
3. Carefully shape the nose clip to fit your nose and adjust the mask to achieve a completely tight to your face.
4. Test the tightness by blowing out air through the mask and if air is passing out under the nose clip or leaking out elsewhere, this must be eliminated before entering contaminated area.


Please Note! Pay attention to the expiry date. Beards or facial hair may effect the efficiency of the product.



EN149:2001+A1:2009
Model Kodu: ALIVE PPE 9020



Üretim Tarihi: 2020/08
SKT: 2022/08

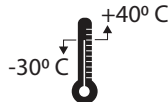

<%80



Kullanıcı bilgi
formuna bakınız.